

REGENhial INTIM Gel

Gel hidratante vaginal

Ingredientes:

Aqua, glycerin, polysorbate 20, sodium hyaluronate*, arginine, lactic acid, phenoxyethanol, ethylhexylglycerin.

Descripción

Gel hidratante vaginal de ácido hialurónico puro* al 1 %.

Presentación

Dos tubos de 24 ml + dos aplicadores.

Indicaciones

Gel hidratante vaginal destinado a la hidratación de la mucosa vaginal, ayudando a mantener la hidratación y el confort de la zona de aplicación.

Contraindicaciones

No aplicar en caso de hipersensibilidad confirmada o bajo sospecha a cualquiera de los componentes de **Regenhial Intim**

Gel (ver composición).

Precauciones


No usar en caso de alteración en el embalaje. • No utilizar el producto después de la fecha de caducidad indicada en el envase. • No ingerir. • Evitar el contacto con los ojos. • Consérvase a temperatura ambiente, lejos de focos de calor y evitar la luz directa. • Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños. • Después de usar, depositar en el contenedor de residuos apropiado, según la práctica nacional aplicable.

(*) Certificado por Ecocert.

Instrucciones de uso

Lavar las manos antes y después de su utilización. **Regenhial Intim Gel** se aplica en el interior de la vagina con la ayuda del aplicador, previamente llenado con 2 ml. Se recomienda una aplicación de **Regenhial Intim Gel** dos o tres veces a la semana o puede utilizarse diariamente en caso de necesidad, preferentemente antes de acostarse.

Componentes: 2 tubos y 2 aplicadores (cánula + émbolo).

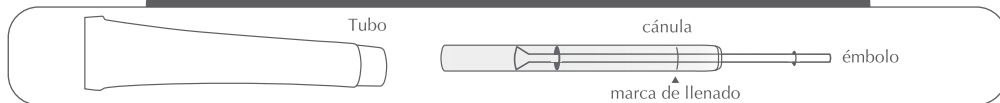

- 1 Enroskar el tubo en el aplicador.
- 2 Apretar el tubo y llenar suavemente el émbolo hasta observar la marca de llenado en el extremo no enroscado de la cánula. La dosis de gel se corresponde con un poco menos de la mitad de la capacidad del dosificador, y se ha de evitar la presencia de aire en el interior.
- 3 Desenroscar el aplicador del tubo e introducirlo profundamente en la vagina, preferentemente tumbada, y vaciar la totalidad de la dosis de **Regenhial Intim Gel** empujando el émbolo con suavidad. Se recomienda aplicar una capa fina de **Regenhial Intim Gel** en la punta del aplicador para facilitar la introducción en la vagina.
- 4 Después de cada aplicación limpiar el aplicador con agua jabonosa y secar correctamente el aplicador. Se recomienda utilizar un aplicador distinto para cada tubo.

